



POLIMEROWE KULKI TERMICZNE



### SPOSÓB ROBIENIA IMPLANTÓW

#### WŁÓŻ 20-30 KULEK DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ

1. POCZEKAJ OK. POL MINUTY AZ STANĄ SIĘ PRZEZROCZYSTE
2. WYJMIJ MASĘ Z MISECZKI I W PALCACH ULEP KULKĘ
3. WŁÓŻ DO MIEJSCA PO BRAKUJACYM ZĘBIE I UFORMUJ KSZTAŁT ZĘBA
4. JEŻELI MASY JEST ZA MAŁO LUB ZA DUŻO TO PONOWNIE WŁÓŻ DO GORACEJ WODY I DODAJ TROCHE KULE LUB ODERWIJ CZĘŚĆ MASY
5. PONOWNIE UFORMUJ KSZTAŁT ZĘBA
6. DOROBIAANY IMPLANT MUSI MOCNO SIĘ TRZYMAĆ MIĘDZY SASIEDNIMI ZĘBAMI.
7. JEŻELI KSZTAŁT ZĘBA JEST JUŻ UFORMOWANY DELIKATNIE GO WYJMIJ.
8. POCZEKAJ AŻ IMPLANT WYSTYGNIE /OK. 5 MINUT/
9. TERAZ MOŻESZ GO PRZYCINAĆ I OPILOWYWAĆ /JESLI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ/
10. PRZYGOTUJ MOCNO ZAPARZONĄ HERBATĘ LUB KAWĘ.
11. POCZEKAJ AŻ WYSTYGNIE
12. GDY JESTES NIE ZADOWOLONA /Y Z EFEKT PONOWNIE WŁÓŻ IMPLANT DO GORACEJ WODY I POWTÓRZ KROKI OD 5-14
13. DO CHŁODNEJ HERBATY LUB KAWY WŁÓŻ GOTOWY IMPLANT.
14. CO CHWILE WYJMUJ GO I POROWNUJ KOLOR IMPLANTU Z WŁASNYMI ZĘBAMI.
15. GDY UZYSKASZ PODPOWIEDNI KOLOR IMPLANT JEST GOTOWY.  
W IMPANTACH MOŻNA PIĆ TYLKO NAPOJE CHŁODNE LUB ZIMNE.  
NIE MOŻNA W NICH JEŚĆ ANI PIC NAPOI CIEPŁYCH ANI GORACYCH.  
ZALECAM ZROBIENIE 2-3 IMPLANTÓW NA SZYBKA WYMIANE W RAZIE  
UTRATY,ZNISZCZENIA LUB ODBARWIENIA.

#### KULKI JAKO DODATKOWA MASA WYRÓWNUJĄCA DO NAKŁADEK NA ZĘBY

1. WSYP 20-30 KULEK DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ.
2. POCZEKAJ OK. 2-3 MINUT AŻ STANĄ SIĘ PRZEZROCZYSTE /ZLEPIA SIĘ W JEDNOLITĄ MASĘ/
3. WYJMIJ MASĘ I ULEP W REKU ODPOWIEDNI KSZTAŁT
4. WŁÓŻ NAKŁADKĘ I UFORMOWANĄ WCZEŚNIEJ MASĘ DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ
5. SCAL OBYDWIE CZĘŚCI I POTRZYMAJ JE W GORĄCEJ WODZIE OK. 1-2 MIN.
6. DELIKATNIE WYJMIJ SCALONE CZĘŚCI Z MISECZKI ODŁUŻ DO WYSTYGNIECIA
7. MOŻESZ POWTARZAĆ TE CZYNNOŚĆ DOWOLNĄ ILOŚĆ RAZY AZ UZYSKASZ ZADOWALAJĄCY EFEKT.

W RAZIE PYTAŃ LUB NIEJASNOŚCI PROSZĘ O TELEFON 790-386-286

Kraj pochodzenia – USA Importer- A.D.I. Adrian Zambrzycki Warszawa