

instant
smile
teeth



INSTRUKCJA MONTAŻU NAKŁADKI NA ZĘBY

KROK 1

**WSYP BIAŁE KULKI DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ I POCZEKAJ OK. 2 MINUT
AŻ KULKI STANĄ SIĘ PRZEźROCYSTE I SIĘ POSKLEJAJĄ**



KROK 2

**PRZY POMOCY ŁŻECZKI ,WYJMIJ KULKI Z MISECZKI I ULEP W RĘKU WAŁEK.
PO ULEPIENIU ,UŁÓŻ WAŁEK WZDŁÓŻ RANTU NAKŁADKI.**



KROK 3

ZMIEŃ WODĘ NA GORĄCĄ I WŁÓŻ NAKŁADKĘ Z WAŁECZKIEM DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ / 90-95 STOPNI CELSJUSZA / POCZEKAJ OK. 3 MINUT



KROK 4

UWAGA NAKŁADKA JEST GORĄCA !!!

ZA POMOCĄ ŁYŻECZKI WYJMIJ NAKŁADKĘ Z GORĄCEJ WODY , STAŃ PRZED LUSTREM I ZAŁÓŻ NAKŁADKĘ . **BARDZO MOCNO DOCIŚNIJ** NAKŁADKĘ, TAK ABY ODCISNEŁY SIĘ NA WEWNETRZNEJ STRONIE NAKŁADKI WŁASNE ZĘBY. Masa ,która podczas montażu wypłynie górą nakładki, utworzy dziąsło, natomiast masę ,która wyjdzie dołem trzeba podwinąć palcem pod własne zęby.



KROK 5

POCZEKAJ OK.4-5 MINUT AŻ NAKŁADKA WYSTYGNIE. WEWNETRZNA MASA ZROBI SIĘ MLECZNO BIAŁA. NAKŁADKA GOTOWA JEST DO UŻYCIA.



ŻEBY NAKŁADKA SIĘ DOBRZE TRZYMAŁA MOŻNA UŻYĆ DOWOLNEGO KLEJU DO PROTEZ ZĘBOWYCH./np. CORREGA MOCNY /

KROK 6

GDY NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z EFEKTU, PONOWNIE WŁÓŻ NAKŁADKĘ DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ I POWTÓRZ KROKI OD 4 DO 6

UWAGA !!! WSZYSTKIE OPREACJE NA NAKŁADCE WYKONYWAĆ POD GORĄCĄ WODĄ, W PRZECIWNYM WYPADKU NAKŁADKA MOŻE PĘKNAĆ.

Importer z USA :

A.D.I. Adrian Zambrzycki Ul.Częstochowska 3a lok 2 02-344 Warszawa

Tel. 790-386-286 adrianwawa1@wp.pl www.sztuczne-zeby.com

CZYSZCZENIE NAKŁADEK NA ZĘBY

NAKŁADKI NA ZĘBY INSTANT SMILE

Za każdym razem gdy wyjmujemy nakładkę z jamy ustnej należy ją umyć w ciepłej wodzie.

Pod ciepłą wodą myjemy szczoteczką do zębów stronę wewnętrzną nakładki w celu usunięcia resztek kleju.

To samo robimy ze stroną imitującą zęby.

W przypadku gdy klej na wewnętrznej stronie nakładki zaschnie ,to usuwamy go za pomocą szczoteczki do zębów pod ciepłą bieżącą wodą ,szorując miejsca z zaschniętym klejem. /nie używać innych narzędzi /

UWAGA!!!

Nakładki na zęby mają tendencję do odbarwiania się, dla tego u osób palących papierosy, fajkę, pijących kawę, coca-cole lub inne napoje które mogą odbarwiać nakładkę na zęby konieczne jest pomalowanie imitacji zębów bezbarwnym lakierem do paznokci / 2 razy/ Po ok.5 dniach zmyć lakier zmywaczem i ponownie dwukrotnie pomalować lakierem np. firmy INGLOT lub HELLY HANSEN- zabezpieczenie mechaniczne. Zalecam jednak ,czyszczenie CHEMICZNE za pomocą emulsji dostępnej na mojej aukcji.

PRODUKT NIE JEST CZĘŚCIOWĄ PROTEZĄ ANI WYROBEM LUB URZĄDZENIEM MEDYCZNYM JEST TO PRODUKT TYMCZASOWY, PRZEZNACZONY TYLKO DO CELÓW ESTETYCZNYCH W PRODUKCIE NIE MOŻNA SPAĆ – GROZI ZADŁAWIENIEM WYRÓB PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 12.12.2003 r. O OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTÓW.

DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT UZYWANIA, MONTAŻU LUB CZYSZCZENIA PRODUKTU MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ ZE STONY

www.sztuczne-zeby.com

tel. 790-386-286